

## Trifectiv® Plus Wound & Burn Care 100 mL (3.4 FL. OZ)

Instruksie/insetsel

**Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** is ideaal om brandwonde, oop wonde, byte, skrape, velinfeksies en ander beserings van die vel te behandel. Die aktiewe bestanddeel is hipochloorsuur (HOCl).

**Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** help met die skoonmaak van die wond en berei die wond voor vir genesing op 'n natuurlike en effektiewe manier. Die oplossing van HOCl het 'n sterk antimikrobiële werking en kalmeer die wond. Dit verseker beter, vinniger genesing met 'n baie laer risiko vir infeksie en 'n verbetering in pyn en reuk in voorheen nie-genesende wonde.

### Samestelling

Steriele oplossing van hipochloorsuur 380 mg/L en water (Aqua)

### Mediese toestel klassifikasie

Mediese Toestel Klas C (ZA). Geskik vir gebruik op oop wonde.

Steriele wond uitspoel middel met antimikrobiële eienskappe.

### Indikasies vir gebruik

Enige toestand waar die vel se integriteit versteur is.

### Kontraindikasies

Vermyn langtermyn aanwending op die gesig vel.

Verwag verminderde effektiwiteit in die teenwoordigheid van kortisoen en anti-inflammatoriese jel.

### Waarskuwing

Indien die toestand waarvoor die produk gebruik word nie verbeter binne 48 tot 96 uur nie, spreek asb. u mediese praktisyn.

Moenie gebruik indien die produk se vervaldatum oorskry is nie.

### Veiligheidsaspekte

Die produk is veilig om te gebruik gedurende swangerskap en borsvoeding. Dit kan ook op kinders, babas & diere aangewend word.

### VINNIGE GIDS

1. Sproei die **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** oor die beseerde area en laat dit natuurlik droog word.
2. Maak 3-5 lae skoon geweefde gaas nat\* met **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** en gebruik dit om die wondarea te bedek.



3. Bedek die wond en nat gaasdeppers met 'n kruipverband.
4. Vervang die wondbedekking daaglik, of ten minste elke tweede dag.



### GEBRUIKSAANWYSINGS VIR SPESIEKE TOESTANDE

#### Aleetsvoet

Wend **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** aan oor die infeksie area 2 x per dag. Maak seker dat die voete skoon en droog is voor aanwending.

#### Swam naelinfeksies

Maak die naels eers skoon met 'n toepaslike produk soos naellak verwyderaar. Suiet die skoon naels met **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care**. Laat dit natuurlik droog word. Herhaal twee keer per dag.

\* *Opmerking: infeksie sal gewoonlik binne twee weke opklaar, maar dit is belangrik om voort te gaan met die gebruik van **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** totdat gesonde naels heeltemal uitgegroe het.*

#### Seer keel

Suiet **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** direk in die keel elke 2 ure totdat die seer keel beter voel. Dit is heeltemal veilig as dit ingesluk word.

#### Ontsteekte of aansteeklike veltoestande, sonbrand, insek byte

Suiet **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** 4 x per dag oor die area en laat dit natuurlik droog word.

#### Snye, skrape, skaafwonde

Wonde moet skoonmaak word voordat die eerste verband van **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** toegedien word. Gebruik 'n spons, warm water, en 'n bietjie borrelbad seep om die wond skoon te was. Maak seker geen reiniger bly op die wond nadat dit met skoon water afgespoel is (moenie soutwater gebruik nie). Druk die wond versigtig droog met 'n skoon handdoek. Geen verdere skoonmaak van die wond sal nodig wees wanneer **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** gebruik word nie. Suiet die aangetaste area deeglik met **Trifectiv® Plus** en laat dit natuurlik droog word. Moenie die oplossing in die vel invry nie. Gaan voort om die wond 3 tot 4 keer per dag te spuiet. As dit nodig is, kan die wond bedek word met 'n crepe verband of pleister.

### Chirurgiese wonde en steke

Verwyder enige chirurgiese verband die dag na jou operasie of so gou as moontlik daarna. Wend 'n enkele laag nie-gemedieerde paraffien gaas oor die steke aan. Maak 3-5 lae skoon nie-gesteriliseerde geweefde gaas nat met 5 mL\* **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** en plaas dit oor die paraffien gaas. Hou in plek met 'n lugdeurlaatbare verband. Verander alle verbande daaglik. Sodra die steke verwyder is spuiet **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** 2 x per dag oor die area en laat dit natuurlik droog word. Bedek indien nodig met 'n lugdeurlaatbare verband.

*As jy nie steke het nie, volg die aanwysings hieronder vir oop wonde.*

### Oop en chroniese wonde en druksere

Suiet dit op die aangetaste gebied totdat die wond nat is. Suiet 5 mL\* van **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** op 3-5 lae skoon nie-gesteriliseerde geweefde gaas totdat die gaas nat maar nie deurweek is nie. Plaas die nat gaas direk op die wond en sorg dat die hele aangetaste gebied bedek is. Vir dieper wonde, maak seker dat die gaas in die wond ingeprop word sodat die nat gaas direk kontak maak met alle oppervlaktes van die wond. Bedek die nat gaas met 'n crepe verband of lugdeurlaatbare verband. Indien moontlik, verander die verband elke dag of ten minste op alternatiewe dae. Maak die wond minstens twee keer per week skoon onder lopende water vir 2-3 minute voordat 'n nuwe verband opgesit word. As die area oopgelos kan word, spuiet **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** elke 2-3 uur op die wond en laat dit natuurlik droog word. Pasiënte moet gereeld oefen, in die mate wat hul toestand dit toelaat.

### Brandwonde

Verwyder enige los vel en vreemde voorwerpe. Wend **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** aan deur dit op die gebrande area te spuiet. Maak 3-5 lae skoon nie-gesteriliseerde geweefde gaas nat met 5 mL\* van **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** en wend dit direk op die wond aan, maak seker dat die hele area bedek is. Verbind met 'n crepe verband of lugdeurlaatbare verband. Vervang die verband daaglik.

### 'n Spesiale opmerking oor paraffien gaas

As die wond bloei na die verwydering van die gaasverband, kan 'n enkele laag nie-gemedieerde paraffien gaas toegedien word voordat die gaasverband aangesit word, **MAAR SLEGS** as AL die nekrotiese materiaal (dooie weefsel, dooie biofilm, vreemde voorwerpe) reeds deur die daaglikse aanwending van **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** gaasverbande verwyder is. In **pediatrisie** brandwonde kan 'n enkele laag nie-gemedieerde paraffien gaas op die wond gesit word voordat die gaas lae wat met **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** nat gemaak is, toegedien word. Dit sal ongemak verminder wanneer die verband vervang word.

### Nuwe-effekte en spesiale voorsorgmaatreëls

Die eerste dag van gebruik kan effens branderig voel.

Moet dit nie saam met waterdigte verbande gebruik nie.

Moenie **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** saam met silwer-bevattende verbande gebruik nie.

Moenie **Trifectiv® Plus** meng of gebruik met of na sout, jodium, chloorheksidien of enige ander handelsmerk-ontsmettingsmiddel nie.

Vir optimale genesing word aanbeveel dat enige sigbare nekrotiese weefsel, en vreemde materiaal verwyder word voordat behandeling met **Trifectiv® Plus Wound & Burn Care** begin word. Raadpleeg asseblief 'n dokter indien nodig.

*Die bottel is GLAS.. Wees asb. versigtig!*

*Moenie binne die bereik van babas en kleuters los wanneer dit sonder toesig is nie. Vervang die doppe na gebruik om die spuitstuk te beskerm en breek te voorkom.*

### Simptome van oordosering

Geen

### Voorkoms van produk

Deursigtige, helder skoon vloeistof

### Houer

100 mL (3.4 FL. OZ) oplossing in 'n wit **GLAS** bottel met sproei pomp.

### Berging

Bêre bottel by kamer temperatuur.

Hou bottel uit direkte sonlig.

Gooi enige ongebruikte produk weg 12 maande na opening.

### Naam en adres van vervaardiger

Thochlor Labs (Pty) Ltd

Unit E1 Stellenbosch Agri-Park, Baden Powell Drive, Lynedoch, Stellenbosch 7600, Suid Afrika

Strepieskode No. 6009900445885

Nappi 1029852-001

SAHPRA 733MD

Mediese Toestel Klas C (ZA)

ISO 13485:2016

Besoek [www.trifectiv.com/usage](http://www.trifectiv.com/usage) vir meer inligting of gebruik die QR-kode



\*Elke verband van 3-5 lae geweefde gaas benodig 5 mL produk – dit is gelyk aan 50 pompe van die 100 mL bottel per verband. Dit verseker optimale benutting van die gaas vir genesing = ongeveer 20 verbande per bottel.