

Trifectiv® Plus Wound & Burn Care 450 mL (15.22 FL. OZ)

Instruksie/insetel

Trifectiv® Plus Wound & Burn Care is ideaal om brandwonde, oop wonde, byte, skrape, velinfeksies en ander beserings van die vel te behandel. Die aktiewe bestanddeel is hipochloorsuur (HOCl).

Trifectiv® help met die skoonmaak van die wond en berei die wond voor vir genesing op 'n natuurlike en effektiewe manier. Die oplossing van HOCl het 'n sterk antimikrobiële werking en kalmeer die wond. Dit verseker beter, vinniger genesing met 'n baie laer risiko vir infeksie en 'n verbetering in pyn en reuk in voorheen nie-genesende wonde.

Samestelling

Steriele oplossing van hipochloorsuur 380 mg/L en water (Aqua)

Mediese Toestel Klassifikasie

Mediese Toestel Klas C (ZA). Geskik vir gebruik op oop wonde.

Steriele wond uitspoel middel met antimikrobiële eienskappe.

Indikasies vir Gebruik

Enige toestand waar die vel se integriteit versteur is.

Kontraïndikasies

Vermag langtermyn aanwending op die gesig vel.

Verwag verminderde effektiwiteit in die teenwoordigheid van kortisoen en anti-inflammatoriese jel.

Waarskuwing

Indien die toestand waarvoor die produk gebruik word nie verbeter binne 48 tot 96 uur nie, spreek asb. u mediese praktisyn.

Moenie gebruik indien die produk se vervaldatum oorskry is nie.

Veiligheidsaspekte

Die produk is veilig om te gebruik gedurende swangerskap en borsvoeding. Dit kan ook op kinders, babas & diere aangewend word.

Vinnige Gids

1. Sproei die Trifectiv® Plus Wound & Burn Care oor die beseerde area en laat dit natuurlik droog word.
2. Maak 3-5 lae skoon geweefde gaas nat* met Trifectiv® Plus Wound & Burn Care en gebruik dit om die wondarea te bedek.



3. Bedek die wond en nat gaasdeppers met 'n kruipverband.
4. Vervang die wondbedekking daagliks, of ten minste elke tweede dag.



Gebruiksaanwysings vir Spesifieke Toestande

Atleetsvoet

Wend Trifectiv® Plus aan oor die infeksie area 2 x per dag. Maak seker dat die voete skoon en droog is voor aanwending.

Swam naelinfeksies

Maak die naels eers skoon met 'n toepaslike produk soos naellak verwyderaar. Spuit die skoon naels met Trifectiv® Plus Wound & Burn Care. Laat dit natuurlik droog word. Herhaal twee keer per dag.

* *Opmerking: infeksie sal gewoonlik binne twee weke opklaar, maar dit is belangrik om voort te gaan met die gebruik van Trifectiv® Plus Wound & Burn Care totdat gesonde naels heeltemal uitgegroeï het.*

Brand boudjies

Maak die area skoon met loutewarm water of klam skoonmaak doekies. Moet asseblief nie seep gebruik nie. Maak saggies droog met 'n skoon, droë handdoek. Sodra die vel droog is, spuit die aangetaste gebied met Trifectiv® Plus Wound & Burn Care en laat dit op 'n natuurlike manier heeltemal droog word. Sodra die vel droog is, dien 'n skerm room op die vel toe. Moet asseblief nie 'n salf soos petroleumjellie gebruik nie. Herhaal bogenoemde stappe met elke doek omruil of ten minste een keer elke 2 uur totdat die brand boudjies genees is.

Seer keel

Spuit Trifectiv® Plus direk in die keel elke 2 ure totdat die seer keel beter voel. Dit is heeltemal veilig as dit ingesluk word.

Ontsteekte of aansteeklike veltoestande, sonbrand, insek byte

Spuit Trifectiv® Plus 4 x per dag oor die area en laat dit natuurlik droog word.

Snye, skrape, skaafwonde

Wonde moet skoonmaak word voordat die eerste verband van Trifectiv® Plus Wound & Burn Care toegedien word. Gebruik 'n spons, warm water, en 'n bietjie borrelbad seep om die wond skoon te was. Maak seker geen reiniger bly op die wond nadat dit met skoon water afgespoel is (moenie soutwater gebruik nie). Druk die wond versigtig droog met 'n skoon handdoek. Geen verdere skoonmaak van die wond sal nodig wees wanneer Trifectiv® Plus Wound & Burn Care gebruik word nie. Spuit die aangetaste area deeglik met Trifectiv® Plus en laat dit natuurlik droog word. Moenie die oplossing in die vel invryf nie. Gaan voort om die wond 3 tot 4 keer per dag te spuit. As dit nodig is, kan die wond bedek word met 'n crepe verband of pleister.

Brandwonde

Verwyder enige los vel en vreemde voorwerpe. Wend Trifectiv® Plus Wound & Burn Care aan deur dit op die gebrande area te spuit. Maak 3-5 lae skoon nie-gesteriliseerde geweefde gaas nat met 5 mL* van Trifectiv® Plus Wound & Burn Care en wend dit direk op die wond aan, maak seker dat die hele area bedek is. Verbind met 'n crepe verband of lugdeurlaatbare verband. Vervang die verband daagliks.

Oop en chroniese wonde en drukere

Spuit dit op die aangetaste gebied totdat die wond nat is. Spuit 5 mL* van Trifectiv® Plus Wound & Burn Care op 3-5 lae skoon nie-gesteriliseerde geweefde gaas totdat die gaas nat maar nie deurweek is nie. Plaas die nat gaas direk op die wond en sorg dat die hele aangetaste gebied bedek is. Vir dieper wonde, maak seker dat die gaas in die wond ingepronk word sodat die nat gaas direk kontak maak met alle oppervlaktes van die wond. Bedek die nat gaas met 'n crepe verband of lugdeurlaatbare verband. Indien moontlik, verander die verband elke dag of ten minste op alternatiewe dae. Maak die wond minstens twee keer per week skoon onder lopende water vir 2-3 minute voordat 'n nuwe verband opgesit word. As die area oopgelos kan word, spuit Trifectiv® Plus elke 2-3 uur op die wond en laat dit natuurlik droog word. Pasiënte moet gereeld oefen, in die mate wat hul toestand dit toelaat.

'n Spesiale opmerking oor paraffien gaas

As die wond bloei na die verwydering van die gaasverband, kan 'n enkele laag nie-gemedieerde paraffien gaas toegedien word voordat die gaasverband aangesit word, **MAAR SLEGS** as AL die nekrotiese materiaal (dooie weefsel, dooie biofilm, vreemde voorwerpe) reeds deur die daaglikse aanwending van Trifectiv® Plus gaasverbande verwyder is. In **pediatrisie** brandwonde kan 'n enkele laag nie-gemedieerde paraffien gaas op die wond gesit word voordat die gaas lae wat met Trifectiv® Plus Wound & Burn Care nat gemaak is, toegedien word. Dit sal ongemak verminder wanneer die verband vervang word.

Nowe-effekte en spesiale voorsorgmaatreëls

Die eerste dag van gebruik kan effens branderig voel. Moet dit nie saam met waterdigte verbande gebruik nie. Moenie Trifectiv® saam met silwer-bevattende verbande gebruik nie. Moet nie meng of gebruik met ander ontsmettingsmiddels nie. Vir optimale genesing word aanbeveel dat enige sigbare nekrotiese weefsel, en vreemde materiaal verwyder word voordat behandeling met Trifectiv® Plus Wound & Burn Care begin word. Raadpleeg asseblief 'n dokter indien nodig.

Die bottel is GLAS.. Wees asb. versigtig!

Oordosering Simptome

Geen

Voorkoms van Produk

Deursigtige, helder skoon vloeistof

Houer

450 mL (15.22 FL. OZ) oplossing in 'n wit **GLAS** bottel met spuitpomp.

Berging

Bêre bottel by kamer temperatuur.

Hou bottel uit direkte sonlig.

Gooi enige ongebruikte produk weg 12 maande na opening.

Naam en Adres van Vervaardiger

Thoclor Labs (Pty) Ltd

Unit E1 Stellenbosch Agri-Park, Baden Powell Drive, Lynedoch, Stellenbosch 7600, Suid Afrika

Strepieskode No. 6009900474472

Nappi 1102811-001

SAHPRA 733MD

Mediese Toestel Klas C (ZA)

ISO 13485:2016

Besoek www.trifectiv.com/usage vir meer inligting of gebruik die QR-kode



*Elke verband van 3-5 lae geweefde gaas benodig 5 mL produk – dit is gelyk aan 10 pompe van die 450 mL bottel per verband. Dit verseker optimale benutting van die gaas vir genesing = ongeveer 90 verbande per bottel.