

## Trifectiv Plus Air

### Nebulising Solution 50 mL (1.69 FL. OZ)

Instruksie/insetsel

**Trifectiv Plus Air** is 'n unieke formule wat gebruik word as 'n nebuliserings-oplossing met ontsmettings- en verligtings eienskappe wat vir inhalasie bedoel is. Trifectiv Plus Air kan gebruik word vir 'n verskeidenheid toestande soos aangedui.

Die aktiewe bestanddeel is hipochloorsuur (HOCl).

Ons liggame maak natuurlik HOCl in die witbloedselle en gebruik dit om infeksie te beveg (insluitend biofilmfeksie), inflammasie te beheer en wonde te genees. Ons mediese graad hipochloorsuur is identies aan die liggaam se eie immuunmolekule. Inaseming lewer hierdie molekule na die area waar dit nodig is – jou longe en lugweë.

### Samestelling

Steriele oplossing van hipochloorsuur 380 mg/L

Water (Aqua)

### Mediese toestel klassifikasie

Mediese Toestel Klas C (ZA).

Steriele middel met antimikrobiële eienskappe.

### Indikasies vir gebruik

1. Help verlig simptome in verband met toestande van die respiratoriese stelsel.
2. Help met die voorkoming en behandeling van neus-, sinus-, keel- en longinfeksies (bakteriese/virale/swam).
3. Help om simptome wat veroorsaak word deur hoes, allergieë (insluitend allergiese rinitis) en ander respiratoriese probleme te verminder.

### Kontraïndikasies

Moet nie gelyktydig met kortisoon- of steroïed-inhaleerders gebruik nie.

### Waarskuwing

Indien die toestand waarvoor die produk gebruik word nie verbeter binne 48 tot 96 uur nie, kontak asb. u mediese praktisyn. Moenie gebruik indien die produk se vervaldatum oorskrei is nie. Moenie ander chemikalieë met die produk meng nie. Moenie die produk verdun nie.

### Veiligheidsaspekte

Die produk is veilig om te gebruik gedurende swangerskap en borsvoeding. Dit kan ook deur kinders en babas gebruik word.

### Dosis en frekwensie

Volwassenes: 5 mL per sessie

Kinders: 0,5 mL per jaar van ouderdom per sessie tot by die maksimum van 5 mL

Voorkoming: een keer per dag

Allergieë of sinus: 1-2 keer per dag

Aktiewe siekte of droë hoes: 2-3 keer per dag

### Gebruiksaanwysings

Gebruik onverdund met 'n moderne nebuliseerder waar die druppelgrootte  $\leq 5\mu\text{m}$  (mikron). Volg die gebruiksinstruksies vir jou nebuliseerder en die doseringsaanwysings hierbo.

Plaas die doppe op die bottel terug nadat die nebuliseerder gevul is. Maak die nebuliseerdertenk/reservoir toe en skakel die nebuliseerder aan. Plaas die gesigmasker oor jou mond en neus. Alternatiewelik sit die mondstuk in jou mond en maak jou mond daaroor toe. Skakel die nebuliseerder aan en haal diep asem deur die mond (en alternatiewelik deur die neus as jy die gesigmasker gebruik).

### Skoonmaak van nebuliseerder

Ons beveel aan om een keer per week of een keer per maand vir 'n paar minute suiwer gedistilleerde water deur die nebuliseerder te laat loop, afhangende van hoe gereeld jy die nebuliseerder gebruik.

### Ontskaleringsprosedure vir jou nebuliseerder

Ons beveel gereelde ontkalking aan as jy Trifectiv Plus Air vir 'n paar weke gebruik. Die oplossing is effens suur, en 'n effense opbou van skaal kan vorm.

Voeg 1 teelepels koeksoda by 'n halwe liter (500 mL) warm water en meng totdat die koeksoda opgelos is. Vul die reservoir van die verstuiver met hierdie mengsel en laat dit vir 30 minute staan. Skakel dan die nebuliseerder soos gewoonlik aan en laat die koeksoda mengsel vir 5 minute daardeur loop. Skakel die nebuliseerder af en maak die tenk leeg – spoel dit uit met skoon water.

Vul met gewone skoon water en laat die nebuliseerder weer vir 5 minute hardloop. Maak dit dan leeg.

### Nebuliseerder wegbêre

Ons beveel aan om die reservoir/tenk leeg te laat met die deksel oop tussen nebuliseringsessies sodat die eenheid kan droog word. Trifectiv Plus Air moet nie tussen sessies in die reservoir gelaat word nie, veral as jou reservoir van deursigtige plastiek gemaak is. Die produk is baie ligsensitief.

Ongebruikte Trifectiv Plus Air moet NIE in die bottel terug gegooi word nie. Gooi elke keer net soveel in as wat jy nodig het en gebruik enige oorblywende vloeistof in die reservoir binne 24 uur.

As die nebuliseerder se battery herlaaibaar is, maak seker dat jy die battery een keer per maand laai, selfs wanneer dit nie gebruik word nie om die battery lewe te verleng.

### Neuwe-effekte en spesiale voorsorgmaatreëls

Effense hoes kan tydens die eerste paar asemhalings voorkom. Effense droogheid van die keel of nies kan voorkom na nebulisering. As oormatige slymproduksie na 2 of 3 dae voorkom, kan dit wees as gevolg van losgemaakte slym wat in die lange teenwoordig was en is 'n positiewe teken.

MOENIE MET SOUTOPLOSSING MENG NIE

*Dit is a glas bottel, wees asb. versigtig.*

### Simptome van oordosering

Geen

### Voorkoms van produk

Deursigtige, helder skoon vloeistof

### Houer

50 mL (1.69 FL. OZ) oplossing in 'n glas bottel met skroefdop.

### Berging

Bêre bottel by kamer temperatuur.

Hou bottel uit direkte sonlig.

Gooi enige ongebruikte produk weg 12 maande na opening.

### Naam en adres van vervaardiger

Thoclor Labs (Pty) Ltd

Unit E1 Stellenbosch Agri-Park, Baden Powell Drive, Lynedoch,

Stellenbosch 7600, Suid Afrika

Strepieskode No. 6009900474403

Nappi 1018191-001

SAHPRA 733MD

Mediese Toestel Klas C (ZA)

ISO 13485:2016

Besoek [www.trifectiv.com/nebulising](http://www.trifectiv.com/nebulising) vir meer inligting of gebruik die QR-kode

